


Instrukcja

Barwienie Cyrkonu płynami Colour Liquid Prettau® Aquarell

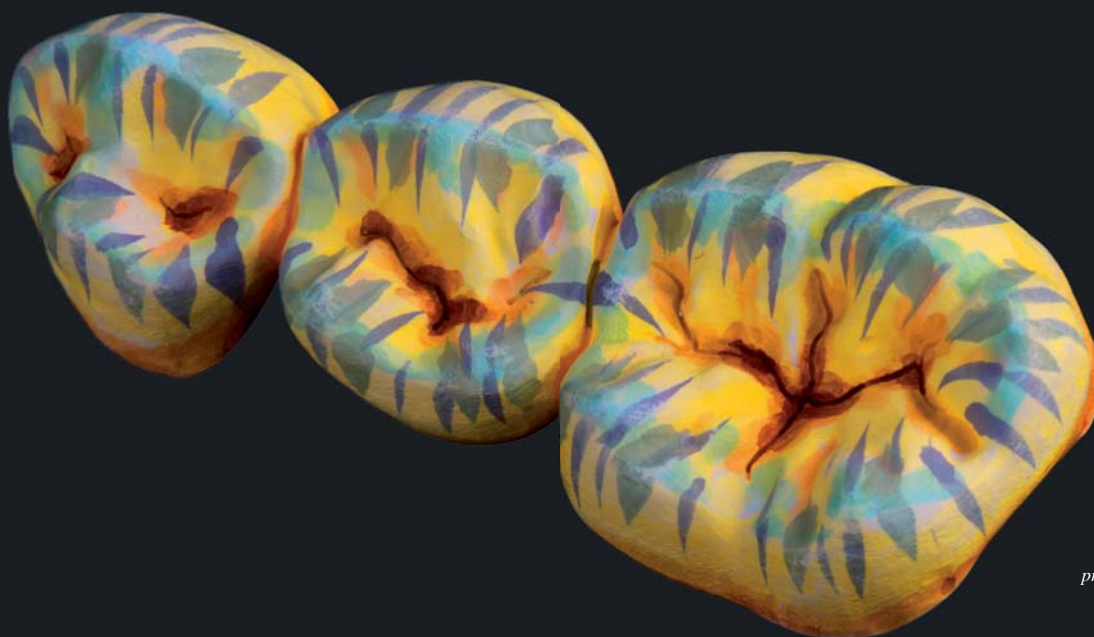


praca zabarwiona przed procesem synteryzacji

Zakres Colour Liquid Prettau® Aquarell w zasadzie odpowiada 16 kolorom obejmującym całe chromatyczne spektrum odcieni Vita. Są to płyny bezkwasowe na bazie wody. Aby pomóc w wizualizacji barwienia cyrkonu nowe płyny zawierają specjalne wypełnienia bio-pigmenty, które pomagają zobaczyć cienie i stopniowanie barw bodezas barwienia. Można z dużą precyzją barwić poszczególne detale takie jak: ma melony przestrzenie międzyzębowe, obszary przyszyjkowe.

Podczas synteryzacji bio-pigmenty są wypalane w 100% a ząb nabiera kolorów w rządzanym odcieniu i wybranym kolorze. Dodatkowo kolory Cervical i Intensive pozwalają osiągnąć artystyczne efekty końcowe.

Wraz z barwnikami Colour Liquid Prettau® Aquarell technika barwienia cyrkonu Prettau® stała się łatwiejsza dokładniejsza i szybsza.

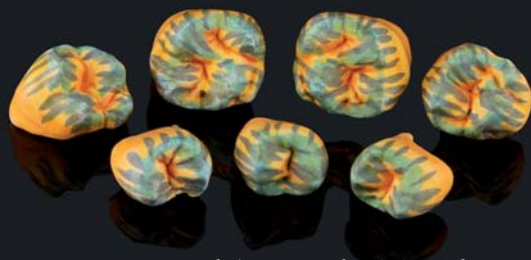

zakończony proces barwienia, przed procesem synteryzacji



po procesie synteryzacji

Wymagane wyposażenie



Colour Liquid Prettau® Aquarell



lampa do suszenia



pędzelek bez metalu do nanoszenia płynu



piec do synteryzacji



papier do osuszania pędzelka

Instrukcja przechowywania i aplikacji

Płyn musi stać w chłodnym i ciemnym miejscu. Dla uzyskania jednorodnego efektu kolorystycznego, przed użyciem należy dobrze wstrząsnąć. Przed barwieniem zanurzyć pędzel w płynie, następnie usunąć nadmiar kropeł załączonym papierem. Przy każdej zmianie koloru pędzel oczyszczać w czystej wodzie.



Instrukcja barwienia zębów przednich

Sytuacja wyjściowa: wyfrezowany ząb



Krok	Colour Liquid	Nakładanie koloru	labial	palatinal
1	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x 2x 3x		
2	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x 2x		
3	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x		
4	Cervical A Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
5	Incisal blue Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x - 2x		
6	Incisal grey Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
7	Incisal violet Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
8	Orange 1 Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
	Brown 2 Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		

Po procesie barwienia prace zostaną umieszczone powierzchnią żującą w dół pod specjalną lampą do suszenia na 20-40 min w zależności od ich wymiarów. Proszę pamiętać, że dłuższy czas suszenia nie ma żadnego negatywnego wpływu na kolorystykę.

Instrukcja barwienia zębów trzonowych

Sytuacja wyjściowa: wyfrezowany ząb



Krok	Colour Liquid	Nakładanie koloru	przydziąsłowe	powierzchnia okluzyjna
1	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x 2x 3x		
2	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x 2x		
3	A3 Prettau® Aquarell Colour Liquid	1x		
4	Cervical A Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x 2x 3x przydziąsłowe p. okluzyjna		
5	Incisal blue Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x - 2x		
6	Incisal grey Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
7	Incisal violet Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
8	Orange 1 Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		
	Brown 2 Aquarell Colour Liquid for Prettau®	1x		

Po procesie barwienia prace zostaną umieszczone powierzchnią żującą w dół pod specjalną lampą do suszenia na 20-40 min w zależności od ich wymiarów. Proszę pamiętać, że dłuższy czas suszenia nie ma żadnego negatywnego wpływu na kolorystykę.

Zakres kolorów Colour Liquid Prettau Aquarell zawiera:



Colour Liquid Prettau® Aquarell A1-D4

na bazie wody z bio-pigmentami bezkwasowymi + pędzel

20 ml lub 50 ml, dostępne w zestawie lub oddzielnie



Colour Liquid Prettau® Aquarell Cervical A-D

na bazie wody bezkwasowa farba z bio-pigmentami dla między zębowych, obszarów szyjki macicy i szczelin zgryzowych.

Dostępne w butelkach 20 ml, odpowiednie dla cyrkonu Prettau®



Colour Liquid Prettau® Aquarell Intensiv

odpowiednie dla cyrkonu Prettau®

20 ml, dostępne w zestawie lub oddzielnie

- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Tissue A:** : na bazie wody bez kwasu z bio-pigmentami dla obszarów dziąsłowych (światło różowe)
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Tissue B:** : na bazie wody bez kwasu z bio-pigmentami dla obszarów dziąsłowych (różowy)
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Tissue C:** : na bazie wody bez kwasu z bio-pigmentami dla obszarów dziąsłowych (fioletowo-różowy)
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal blue:** na wodzie bez kwasu z bio-pigmentami wpływ głębokości w obszarze brzęgu siecznego „usta-ryby“ i przejrzystych niebieskich.
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal grey:** na wodzie bez kwasu z bio-pigmentami dla przezroczystych obszarów obniżenie szarości
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal violet:** na wodzie bez kwasu z bio-pigmentami dla przezroczystych obszarów siecznego
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Orange 1:** na wodzie bez kwasu z bio-pigmentami dla przezroczystych zgryzu bruzd
- **Colour Liquid Prettau® Aquarell Brown 2:** na wodzie bez kwasu z bio-pigmentami dla przezroczystych zgryzu bruzd



Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment

10 ml, dostępne w zestawie lub oddzielnie

- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment A1-D4:** wypalenia kolorowe pigmenty do odświeżania Colour Liquid Prettau® Aquarell A1-D4
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Tissue:** wypalenia kolorowe pigmenty do odświeżania Colour Liquid Prettau® Aquarell Tissue A-C
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Orange:** wypalenia kolorowe pigmenty do odświeżania Colour Liquid Prettau® Aquarell i Colour Liquid Cervical A-D Prettau® Aquarell
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Brown:** wypalenia kolorowe pigmenty do odświeżania Colour Liquid Prettau® Aquarell Brown 2
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Grey:** wypalenia kolorowe pigmenty do odświeżania Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal grey
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Violet:** wypalenia kolorowe pigmenty do odświeżania Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal violet
- **Colour Liquid Aquarell Bio-Pigment Blue:** wypalenia kolorowe pigmenty do odświeżania Colour Liquid Prettau® Aquarell Incisal blue



Colour Liquid Waterbased Rozcienczalnik

Na bazie wody do rozcieńczania i rozjaśniania wszystkich barwników. Colour Liquid Prettau® Aquarell, a także Cervical-and Intensive Prettau® Aquarell cienie.

100 ml



Colour Liquid Waterbased Stabilizator

Na bazie wody, do homogenizacji wszystkich Colour Liquid Waterbased, Colour Liquid Prettau® Aquarell, i Cervical-and Intensive Prettau® Aquarell a także do korekcji rezultatów barwienia (dodatek 5% stabilizatora).

100 ml